



Warzen-Ex-Stift

Medizinprodukt

SOS Warzen-Ex-Stift hat eine neue Rezeptur mit neuem Stift. Beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung.

SOS Warzen-Ex-Stift zur einfachen und effektiven Entfernung gewöhnlicher Warzen. Mit dem Stift ist die keratolytische Wirkstofflösung punktgenau auf der Warze an Händen, Füßen, Rumpf, Armen und Beinen aufzutragen. Die Lösung mit dem hochwirksamen und natürlichen Wirkstoff Ameisensäure zieht sofort in die Warze ein, bricht das betroffene Gewebe lokal auf und trocknet es schmerzfrei aus. Die Wirksamkeit ist klinisch bestätigt. Der SOS Warzen-Ex-Stift ist sehr ergiebig und reicht für mindestens 220 Anwendungen. Pro Warze wird eine 14-tägige Behandlungsdauer empfohlen.

Der SOS Warzen-Ex-Stift ist mit einem keratolytischer Wirkstoff versehen. Beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung. Nur zur äußeren Anwendung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Indikation:

Der SOS Warzen-Ex-Stift eignet sich zur Behandlung von Warzen an Füßen und Händen, Körper, Armen und Beinen. Das Produkt kann angewendet werden bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren.

Warzen:

Warzen sind lokale Hautwucherungen, die durch das humane Papillomavirus (HPV) verursacht werden. Sie können einzeln oder in Gruppen auftreten. Es gibt verschiedene Arten von Warzen, zumeist treten sie auf an Händen, Füßen, Ellbogen und Knien. Warzen sind ansteckend und werden durch den Kontakt des Virus mit der Haut verbreitet.

SOS Warzen-Ex-Stift:

Der SOS Warzen-Ex-Stift ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt. Die Packung enthält einen SOS Warzen-Ex-Stift und diesen Beipackzettel. Der SOS Warzen-Ex-Stift enthält 3 ml für mindestens 220 Anwendungen. Der SOS Warzen-Ex-Stift ist speziell für die punktuelle Anwendung direkt auf den Warzen bestimmt. Die Lösung zieht sofort in die Warze ein. Der SOS Warzen-Ex-Stift enthält einen keratolytischen Wirkstoff, der das Gewebe lokal auflöst und austrocknet und so Warzen behandelt.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Nur für die äußere Anwendung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Produkt enthält einen ätzenden und stark riechenden Wirkstoff. Nicht einatmen. Wenden Sie das Produkt nicht bei Warzen im Genitalbereich oder im Gesichtsbereich an.

Wenden Sie den SOS Warzen-Ex-Stift nicht an, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie überempfindlich oder allergisch auf die Inhaltsstoffe sowie auf Bienen- und Ameisengift reagieren. Vermeiden Sie beim Auftragen den Kontakt mit der gesunden Haut um die Warze herum. Setzen Sie die behandelte Stelle nicht dem Sonnenlicht aus, bis sich die Haut wieder normalisiert hat. Wenden Sie den SOS Warzen-Ex-Stift nicht auf Wunden oder blutenden Warzen, gereizter, entzündeter, blasiger oder geschädigter Haut an. Warten Sie zuvor, bis sich die Haut erholt hat. Nicht anwenden auf Warzen mit Haaren, Muttermalen, Mitessern, pigmentierter Haut oder wenn Sie Zweifel haben, ob es sich bei der Hauterkrankung um eine Warze handelt. Besondere Vorsicht ist geboten bei der Anwendung auf dünner und empfindlicher Haut sowie bei der Behandlung von Kindern und Menschen mit Diabetes mellitus. Im Zweifelsfall ist es besser, wenn Sie weniger Flüssigkeit auftragen. Eine übermäßige Anwendung kann zu Nebenwirkungen wie Wunden, Blasen, Entzündungen, absterbendem Gewebe (Nekrose), Narben und Verätzung führen. Die Anzahl der empfohlenen Anwendungen darf nicht überschritten werden. Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn die behandelte Stelle rot und schmerzhaft wird oder sich entzündet.



Einzelner Patient - mehrfach anwendbar.



Nicht ohne ärztliche Empfehlung bei Kindern unter 4 Jahren anwenden.

WENN DAS PRODUKT UNBEABSICHTIGT IN KONTAKT MIT AUGEN ODER SCHLEIMHÄUTEN GELANGT, 15 MINUTEN LANG MIT VIEL WASSER AUSSPÜLEN UND EINEN ARZT AUFSUCHEN.



Wie der SOS Warzen-Ex-Stift angewendet wird:

Es wird empfohlen, die Warze vor der Behandlung mindestens 5 Minuten in lauwarmem Wasser einzuweichen, damit die Haut weich wird. Wenn die Warze von harter Haut bedeckt ist, schaben Sie ihre Oberfläche vorsichtig ab (z. B. mit einer Kosmetikfeile) und entfernen Sie die harte Haut vorsichtig. Feilen Sie die Warze nicht. Es wird empfohlen, dass Erwachsene den SOS Warzen-Ex-Stift bei Kindern anwenden.

1. Nehmen Sie die Kappe vom SOS Warzen-Ex-Stift ab.
2. Reiben Sie die Warze maximal 20 Sekunden lang sanft mit der Spitze des SOS Warzen-Ex-Stifts ein. Die Lösung dringt sofort ein. Achten Sie darauf, dass die gesamte Warze bedeckt ist und vermeiden Sie Kontakt mit der umliegenden gesunden Haut. Den Stift nach Gebrauch wieder fest verschließen.

3. Wiederholen Sie die Behandlung bis zu 6 Wochen lang 3 Mal die Woche (im Abstand von einem Tag, danach 2 Tage Pause). **Die Anzahl der empfohlenen Anwendungen darf nicht überschritten werden.**

Der SOS Warzen-Ex-Stift gibt eine kleine Menge einer farblosen Lösung ab. Wenn Sie Zweifel haben, ob die Spitze nicht ausgetrocknet ist, drücken Sie sie gegen ein Blatt saugfähiges Papier und kontrollieren Sie die Flüssigkeitsabgabe. Bei Unwohlsein oder Schmerzen die Anwendung abbrechen. Wenn es brennt oder sticht oder das Mittel auf die gesunde Haut gelangt, mit kaltem Wasser abspülen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Wenden Sie das Produkt stets gemäß den Anweisungen an. Tragen Sie nicht zu viel auf, da es ansonsten zu Hautschäden kommen kann! (Siehe VORSICHTSMASSNAHMEN oben.) Manchmal kann 10–15 Minuten lang ein leichtes Kribbeln oder Brennen spürbar sein. Bei übermäßigem Auftragen können vorübergehende Nebenwirkungen wie Stechen, Rötung, Schmerzen oder Blutungen auftreten. Es sind keine Nebenwirkungen bei schwangeren und stillenden Frauen bekannt. Schwere wiegende Zwischenfälle sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Lagerung:

Stift nicht nach Ablauf des Verfallsdatums oder später als 6 Monate nach dem erstmaligen Abnehmen der Kappe anwenden. Den Stift nach der Anwendung gut verschließen. Das Produkt kann gemäß den lokal geltenden Richtlinien entsorgt werden.

 SOS Warzen-Ex-Stift mit neuer Rezeptur und neuem Stift. Beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung.

 **Hersteller:**
Unigroup ApS
Diplomvej 373
DK-2800 Lyngby
Dänemark

 0425





Ätzend

Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Bessie-Coleman-Straße 13, D-60549 Frankfurt

TECHNISCHE DATEN – Produktname: SOS Warzen-Ex-Stift Inhaltsstoffe: Ameisensäure (85 %). Dimethylsorbit. Wasser. Caprylsäure, Oreganoblatt-Extrakt. Inhalt: 3 ml, ausreichend für mindestens 220 Anwendungen. Registrierung: Der SOS Warzen-Ex-Stift ist als Medizinprodukt der Klasse IIa eingestuft und registriert. Lagerung: Bei 2–25 Grad Celsius lagern. In der Originalverpackung, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Bedeutung der Symbole auf Packung:


 Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und in der Originalverpackung.

 Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

 **LOT** Chargenbezeichnung

 Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

 Nach dem ersten Abnehmen der Kappe nach spätestens 6 Monaten aufbrauchen. Den Stift nach Gebrauch wieder fest verschließen.

 Lagerung bei 2–25 °C.

 Einzelner Patient - mehrfach anwendbar.

 Nur zur äußeren Anwendung.

 Nicht bei Kindern unter 4 Jahren anwenden, außer auf ärztliche Anweisung.

Stand der Information: 2021.10