

SOS Stich-Hilfe ist ein Medizinprodukt. Nicht als Spielzeug verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder Menschen mit sensorischer und / oder körperlicher Einschränkung aufbewahren.

**Reinigung:**

Die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen und es eventuell in mit Desinfektionslösung getränkte Tücher wickeln, und gründlich trocknen.

**Technische Daten:**

- Entladespannung ca. 13 kV (ohne Belastung),
- Dauer einer einzelnen Entladung: 0,01 ms,
- geschätzte Lebensdauer des Geräts: 25.000 Entladungen (bis zu 5.000 Stiche).



Das Produkt am Ende seiner Lebensdauer bitte korrekt und entsprechend der geltenden Gesetze entsorgen.



Anwendungsteil des Typs BF



Chargennummer: Auf der Geräteunterseite

**Stand der Information:** 12.2018

Patente Nr. EP2089102B1, US8712555, US9474899B2, AU2007320897B2 und weitere internationale Patente angemeldet

**Anwendung:**

Das Gerät in der Hand halten und zwischen Zeige- und Mittelfinger platzieren (siehe Bild). Die Spitze des Geräts direkt auf den Stich und die Schwellung halten und den Knopf so oft wie erforderlich mit Ihrem Daumen drücken. Bei jedem Klick entsteht ein leicht kribbelndes Gefühl.

**Erwachsene:**

5 bis 10 Klicks anwenden, um den Juckreiz des Mückenstichs zu vermindern, und 10 bis 15 Klicks anwenden, um die Schwellung zu lindern.

**Kinder (über 3 Jahren):**

Die halbe Dosis ist ausreichend.

**Empfindliche Personen oder Personen mit Allergien:** Es können zusätzliche Anwendungen erforderlich sein.

Falls der Juckreiz zurückkehrt, die Maßnahme bei Bedarf wiederholen. Die vorteilhafte Wirkung von SOS Stich-Hilfe ist normalerweise bereits wenige Minuten nach Gebrauch zu spüren. Für beste Ergebnisse wird empfohlen, das Gerät so bald wie möglich nach dem Mückenstich zu verwenden.

**Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen:****Diese Gebrauchsanweisung aufbewahren.**

Nicht/nur mit Vorsicht verwenden:

- in oder um empfindliche Bereiche wie Mund, Zunge, Augen, Gehörgang, Handgelenksinnenseite oder Handflächen usw.,
- mit nassen Händen und auf nasser Haut,
- nur zur äußerlichen Anwendung,
- bei Reizungen die Behandlung abbrechen,
- es wird empfohlen, dass das Gerät nur von einer Person angewendet wird.

**SOS Stich-Hilfe** ist schnell und wirkstark gegen juckende Mückenstiche. Zur effizienten Behandlung ist das batteriefreie Gerät möglichst zeitnah direkt auf den frischen Mückenstich anzulegen. Basierend auf Piezo-Elektrizität wird mit jedem Klick ein kurzer, elektrischer Impuls erzeugt, der punktgenau die juckende Haut beruhigt. 5–15 Klicks bewirken sowohl eine schnelle Reduktion des Juckreizes als auch das Ab-schwellen des Mückenstichs. Bei wiederkehrendem Juckreiz kann die Behandlung direkt wiederholt werden. SOS Stich-Hilfe gewährleistet eine leichte und schnelle Behandlung von bis zu 5.000 Mückenstichen und ist zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 3 Jahren geeignet.



**Bitte lesen Sie vor Anwendung des Geräts diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch**

**Funktionsweise:** Das Gerät arbeitet mit Piezo-Elektrizität.

**⚠ ACHTUNG! Nicht verwenden bei:**

- Personen mit einem implantierten elektronischen Gerät, mit Herz-erkrankungen oder Epilepsie,
- bei schwangeren Frauen und Kindern unter 3 Jahren,
- auf offenen Wunden, auf blutenden oder nässenden Bereichen, Entzündungen oder wenn Sie gegenüber elektrischen Reizen empfindlich sind,
- nach Anwendung von Insektenschutzmitteln und/oder brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen oder in der Nähe solcher Substanzen (bspw. Parfüm oder Rasierwasser).

**Weitere Warnhinweise auf der Innenseite**

**Hersteller:**

TECNIMED S.R.L.

P.le Cocchi, 12

21040 Veduggio Olona (VA) IT



Hergestellt in Italien

**CE** 0051

